

FACE VISOR FSG

Gesichtsvisier bestehend aus:
 Gestell aus Polycarbonat,
 mit Visier aus Klarsicht-Folie (APET),
 zur einfachen Selbstmontage
 Maße (B x H x L):
 ca. 200 x 200 x 150 mm
 Gewicht: 28 g


FACE VISOR FSG

Face visor consisting of:
 Frame made of polycarbonate,
 with visor made of transparent film (APET),
 for easy self-assembly
 Dimensions (W x H x L):
 approx. 200 x 200 x 150 mm
 Weight: 28 g


concept-s
 Ladenbau & Objekt-design GmbH
 Steinbeisstraße 8
 73614 Schorndorf
 Deutschland Germany

Tel +49 (0) 71 81 9 93 71 - 0
 Fax +49 (0) 71 81 9 93 71 - 62
 www.concept-s-design.com
 info@concept-s-design.com


GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION MANUAL

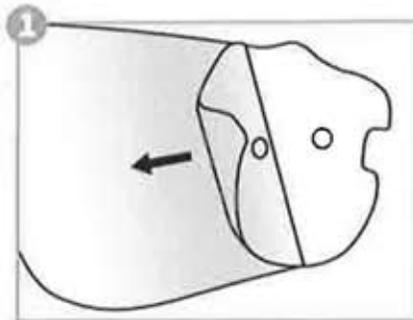


1.
Entnehmen Sie das Foliervisier aus der Verpackung und ziehen Sie beidseitig die Kratzschutzfolie ab
 Remove the film visor from the packaging and pull off the scratch protection film on both sides

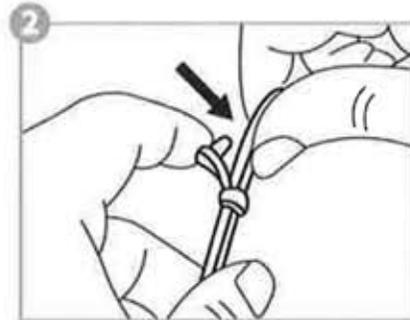

2.
Verschlusslasche am Ohrbügel seitlich öffnen und weghalten
 Open the closing flap on the earhook laterally and hold it away

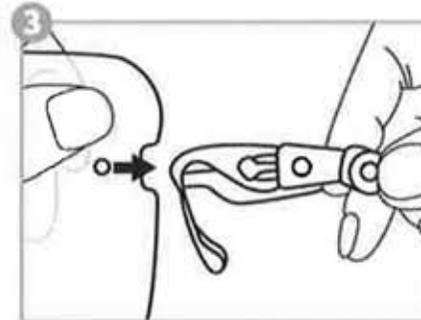

3.
Foliervisier am Ohrbügel mit Loch am Anschlag ausrichten
 Align foil visor on earhook with hole on stop

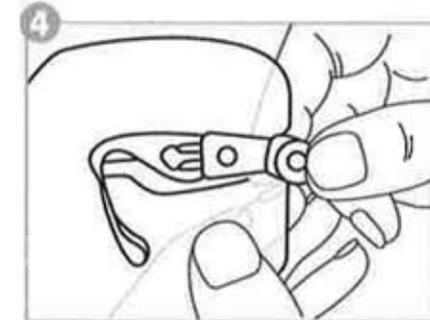

4.
Verschlusslasche durch Lochöffnung zudrücken. Schritt 2 bis 4 auf der anderen Seite wiederholen.
 Close the closing flap through the hole opening. Repeat steps 2 to 4 on the other side.